

Tisztító spray

Alkoholmentes összetételével, bőrbarát formulájával és antibakteriális hatásával kiváló megoldás a hallókészülékek külső tisztítására. Javasolt a spray-t egy kendőre fújva használni és azzal áttörölni a hallókészüléket, hogy ne kerüljön közvetlenül a hallókészülékbe a tisztító spray folyadék.




Elektromos szárító készülék

Az elektromos szárító eltávolítja az összegyűlt nedvességet a hallókészülékből, egyéni illesztékből; kiszárítja a fülzsírt és megszünteti a szagokat. Használatával a hallókészülékek jobban működnek, és magas páratartalmú környezetben az elemek élettartama sem rövidül.

Az elérhető választékról érdeklődjön az Önhöz legközelebbi hallásvizsgálónkban.

- PerfectDry Lux
- DryDome

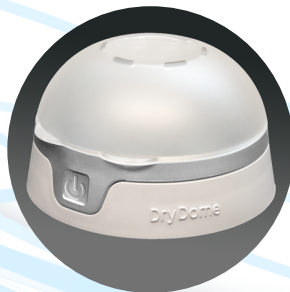

Tisztító tableta

Használatával csökkenthető a különböző mikroorganizmusok elterjedésének valószínűsége. A tisztító tabletták higiénikusak, biztonságosan és könnyen alkalmazhatóak. Egy csomagban 7 db tisztító tableta található.

FONTOS TUDNIVALÓK

- **Védje** hallókészülékét a nedvességtől (pl. gőzfürdő, zuhanyozás, eső stb.).
- **Mindig vegye le** hallókészülékét, mielőtt after shave-et, hajlakkot, olajat, parfümöt, szúnyogriasztó spray-t, testápolót stb. használ. Csak ezen anyagok megszáradása után tegye fel hallókészülékét.
- **Minden esetben** keresse fel audiológusát, ha: az illeszték irritálja fülét, vagy megnehezíti a hallókészülék használatát. Ha az illeszték elszíneződik, elszakad, esetleg már nem lehet róla eltávolítani a szennyeződést.
- **A fülhorgot soha** ne tisztítsa tisztító damillal, mert ezzel elronthatja a hallókészülék tartozékot. Ügyeljen arra, hogy ne tekerje túl a fülhorgot.

SZÓMAGYARÁZAT

Egyéni illeszték: Tipikusan a fülmögötti, fülhoroggal rendelkező hallókészülékekhez alkalmazott, egyéni hallójárat mintavétel alapján készített tartozék.

Hangszóró a fülben (RITE) kialakítás:

A fülmögötti hallókészülékek azon csoportja, ahol a hangszóró nem a készülék házában található, hanem a hallójáratba kerül kivezetésre.

Tisztító damil: A hallókészülékek szellőző furatainak, a vékonycső, a fülhorog, illetve az egyéni illeszték tisztítására szolgáló eszköz.

Amennyiben további kérdése van hallókészüléke tisztításával kapcsolatban kérjük, fáradjon be az Önhöz legközelebbi Victofon Hallásvizsgálóba. Igény esetén kollégáink megtisztítják hallókészülékét.

Victofon Kft.

1068 Budapest, Szondi u. 98/a

☎ Telefon: 06-1/302-0632,
Fax: 06-1/301-0647
Zöldszámunk: **06-80/204-000**
(ingyenesen hívható)

@ ugyfelszolgalat@victofon.hu
🌐 www.victofon.hu

f [facebook.com/victofon](https://www.facebook.com/victofon)

Tisztítási tájékoztató
Fülhoroggal
és egyéni illesztékekkel
ellátott hallókészülékhez



MIÉRT FONTOS

a hallókészülék mindennapos, szakszerű tisztítása?

Az egészséges fül is termel fülzsírt, amely képes beszennyezni a hallókészüléket.

Nemzetközi felmérések szerint átlagosan

háromból két esetben a helytelen vagy nem rendszeres tisztítás miatt kerülnek a hallókészülékek szervizbe.

A rendszeres karbantartás, a hallókészülékek napi szintű tisztítása jelentős mértékben csökkenti a meghibásodások esélyét.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, hogy megelőzhesse hallókészüléke meghibásodását.

TISZTÍTÁS MÓDJA




Érdemes tudnia:


A tisztítást minden esetben reggel ajánlott elvégezni!

TISZTÍTÁS MENETE

I. Fülhorog levétele

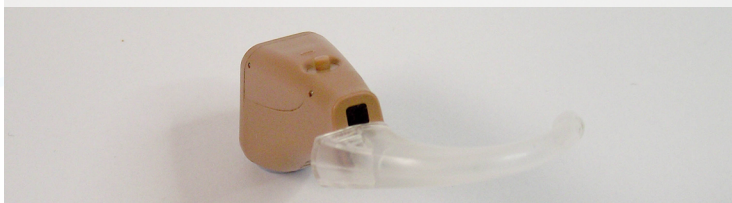


1. típus: A fülhorog levételéhez fordítsa el 90 fokkal a fülhorgot, majd húzza le a hallókészülékről.

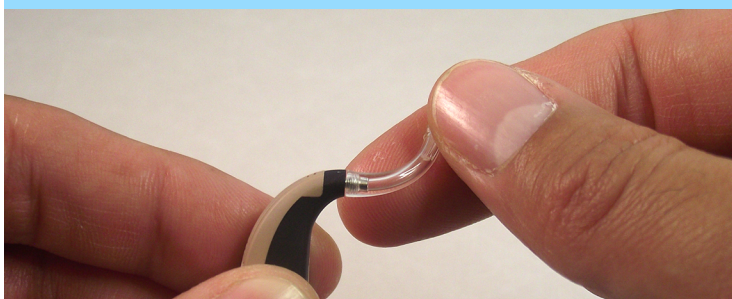


2. típus: A fülhorog levételéhez tekerje le a fülhorgot az óramutató járásával ellentétes irányban.

II. A fülhorog és egyéni illeszték tisztítása

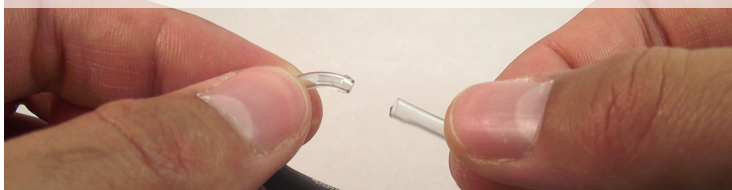


Húzza szét a fülhorgot és az egyéni illeszték csövét. Használja a törlőkendőt és a tisztító kefért a fülhorog külső felületének megtisztításához.

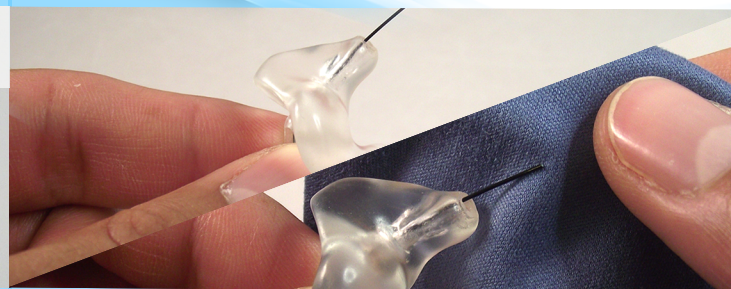


Ha szükséges, használjon tisztító damilt az egyéni illesztékben lerakódott szennyeződés eltávolításához. Amennyiben a tisztító damil végén fülzsír halmozódott fel, még az egyéni illesztékből való visszahúzás előtt törölje le, majd tisztán húzza ki az egyéni illesztékből.

III. A fülhorog visszahelyezése

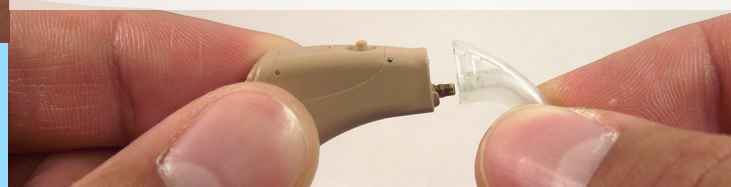

1. típus: A fülhorog visszahelyezéséhez egyenesen pattintsa rá a fülhorgot a hallókészülékre.

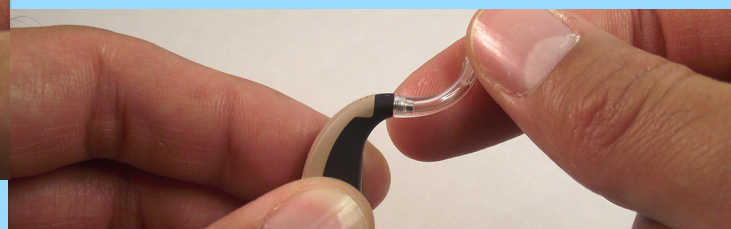

2. típus: A fülhorog visszahelyezéséhez tekerje fel a hallókészülékre a fülhorgot az óramutató járásával megegyező irányban.

A hallókészülék ápolásához érdemes igénybe vennie tisztító és szárító eszközöket is, hiszen a meghibásodások jelentős része a fülzsír, pára vagy izzadás miatt alakul ki.

TISZTÍTÓ- ÉS SZÁRÍTÓ ESZKÖZÖK

- Illeszték tisztító pezsgőtabletta
- Illeszték tisztító pumpa
- Illeszték tisztító fonal, egyéni illesztékhez
- Szárító patron
- Szárító tégely
- Tisztító spray
- Fertőtlenítő kendő
- Elektromos szárító